


Produktionsprocess engångsvisir



1. Klipp ett resårband i 28 cm.

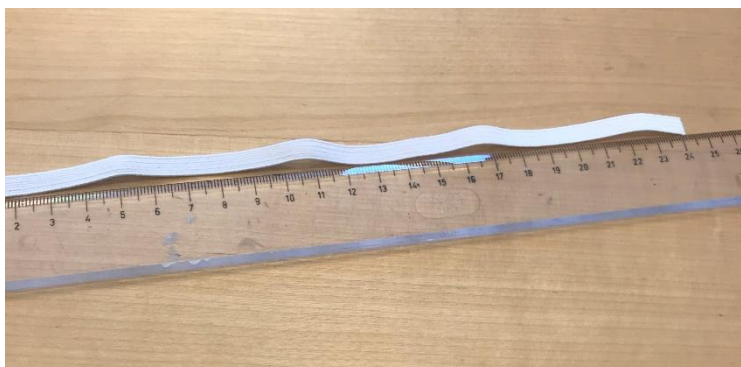


2. Ta ett overhead-papper i A4-format. Klipp ett jack nedtill längs långsida, ca 4 cm upp.



3. Fäst resårbandet med 2 häftklamrar på varje kortsida, ca 1 cm in.

OBS! För att plasten inte ska spricka i klammerhålen behöver hörnen förstärkas med en tejpbit.

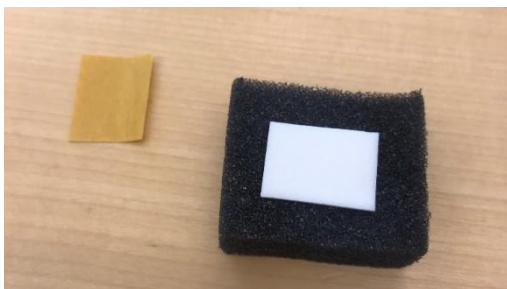

4. Fäst 2 st skumgummitärningar (ca 3x3 cm) med dubbelhäftande tejp högst upp längs långsidan. Fäst dem med ca 5-6 cm mellanrum. Tryck till ordentligt.





5. Lägg flikarna vid klippet omlott och fäst ihop med dubbelhäftande tejp. (Syftet är att den ska omsluta hakan)




6. Tejpa slutligen ihop skarven på utsidan vid den dubbelhäftande tejp för att säkerställa att det blir helt tätt.



7. Färdigt engångsvisir.



Visiret till vänster är
flergångsvisir och visiret
till höger är engångsvisir.

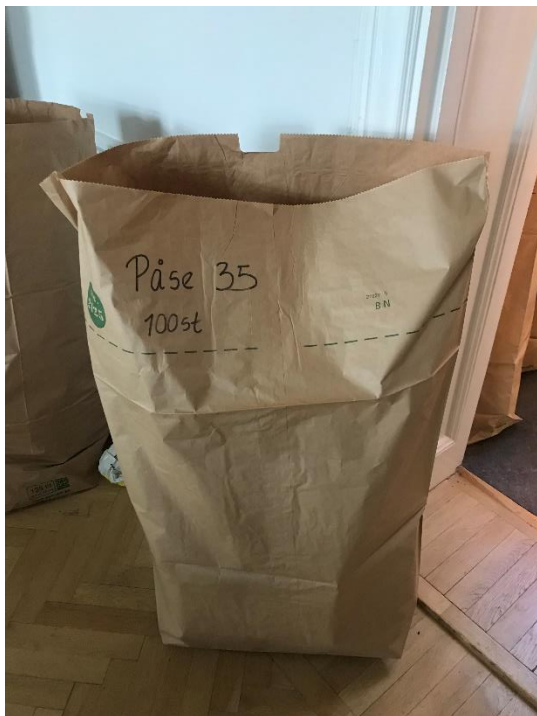

Lägg 100 engångsvisir i papperspåse och märk påsen med nummer.

Det här behöver du:

OH-film

Häftapparat

Resårband (twistband)

Tejp

Dubbelhäftande tejp

Kuddar för att få ett avstånd emellan ansikte och visir. Detta har varit olika material tex. Tvättsvampar, liggunderlag och annat som vi kommit över.

Bruna papperssäckar att packa de färdiga visiren i.

Övriga tips!

Instruktionen är enligt produktionslinan, steg för steg. Så gör stationer och placera ut personer på varje station, det går åt lite olika antal personer på varje station beroende på hur länge varje steg tar.

Om man är cirka 10-15 personer, då kan man tillverka ungefär 1000 stycken på 3 timmar.